

LIQUIBANDFIX8®

Equipo laparoscópico de fijación de mallas de hernia



Advanced Medical Solutions



Diseñado para la fijación atraumática de mallas de hernia

El diseño avanzado de **LIQUIBANDFIX8®** ofrece una fijación precisa, diseñada para la seguridad del paciente.

- *Nuevo diseño de punta atraumática*
- *Administración avanzada de anclajes*
- *Cierre del peritoneo*
- *Recomendado para la hernia ventral e incisional*
- *Fijación de mallas segura y confiable*
- *Aplicación precisa y controlada*
- *Fijación desde múltiples ángulos*

Los innovadores anclajes líquidos ayudan a una fijación firme de mallas de hernia, y reduce el riesgo de varias complicaciones postquirúrgicas, tales como:

- Neuralgia.
- Parestesia.
- Traumatismo tisular mecánico.



Seguro y confiable



Equipamiento rápido



Fuerte y seguro




Aplicador preciso



Mejor atención al paciente



Nuevo adhesivo tintado

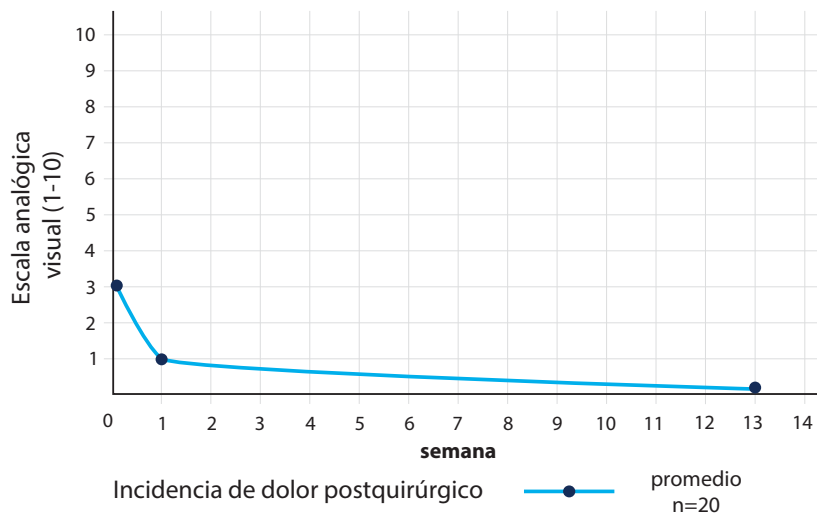

LIQUIBANDFIX8® Mostró tener una incidencia baja de dolor postquirúrgico en la fijación de mallas de hernia.


LIQUIBANDFIX8® ha mostrado tener una fuerza de cizallamiento mayor que las de un dispositivo de puntadas.



Romper el espiral de dolor postquirúrgico en la fijación de mallas de hernia

Preciso y ergonómico

El diseño innovador ofrece un manejo sencillo y la administración controlada de anclajes líquidos.

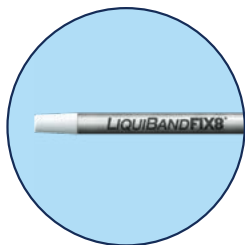

**Punta atraumática
antiadherente**



Indicador de cantidad



**Gatillo de administración
controlada**



Diseño ergonómico

Pasos de preparación

Paso 1:



Posicione el dispositivo unos 45° hacia abajo. Levante completamente la cubierta azul de manera firme en la dirección de la flecha 1 para utilizar la ampolla. Después de esto, espere 5 segundos.

Paso 4:



Quite y deseché el componente de seguridad rojo.

Paso 2:




Mantenga el dispositivo con el cuerpo del aplicador vertical, y con la punta hacia abajo, accione lentamente el tirador rojo hacia atrás. La transferencia completa del tejido adhesivo a la cámara de dispensación dura unos 20 segundos. Una vez terminado este proceso, el tirador del componente se desengachará automáticamente, y podrá ser desechado.

Paso 5:




Asegúrese de que el extremo distal del equipo esté situado en la bandeja plástica de dispensación. Mueva la perilla rotatoria en la dirección de la flecha 5. El gatillo se soltará de manera automática.

Paso 3:

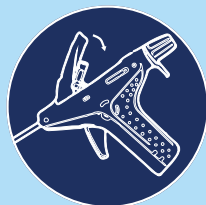

Rote la cubierta azul hacia abajo en la dirección de la flecha 3 y presione de manera firme hasta que encaje en el cuerpo del dispositivo.

Paso 6:

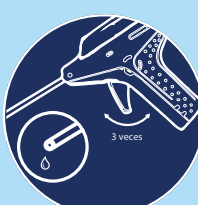

Accione el gatillo con el extremo distal dentro de la cavidad de dispensación hasta que el tejido adhesivo se haya administrado (aproximadamente de dos a tres veces). El equipo estará preparado para su uso.